



## GRIPPER PLUS bezpieczna igła Hubera

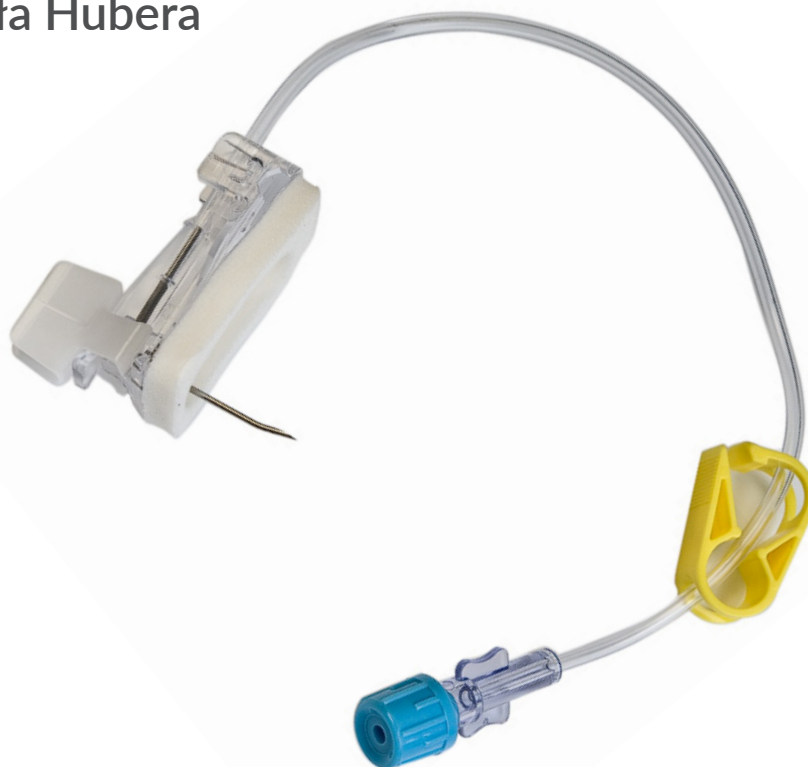


- › zminimalizowany ból przy wypinaniu igły
- › mechanizm zabezpieczający w postaci uchylnej dźwigni sygnalizujący wizualnie i dźwiękowo bezpieczne położenie igły
- › niskoprofilowa budowa zwiększająca wygodę pacjenta w miejscu wkłucia do portu
- › zdejmowane skrzydełka i przezroczysty korpus dla większej wzrokowej kontroli wkłuwania igły
- › miękka platforma wykonana z nienasiąkliwego materiału:
  - › zwiększa komfort pacjenta
  - › zwiększa stabilność igły
  - › zabezpiecza miejsce otaczające port
- › rozmiar igły kodowany kolorem
- › zintegrowany dren z PCW (bez DEHP) o długości 20,3 cm
- › opcjonalny port boczny typu Y do wstrzyknięć współpracujący z akcesoriami bezigłowymi
- › zakończenie z łącznikiem typu Luer-Lock minimalizujące niebezpieczeństwo rozszczelnienia lub odłączenia drenu
- › długi dopuszczalny czas noszenia igły – do 7 dni
- › kompatybilność ze środowiskiem MRI (do 3T)
- › możliwość stosowania do podaży przy użyciu pomp infuzyjnych
- › możliwość podaży agresywnych leków (np Taxol) oraz lipidów


**AKME**

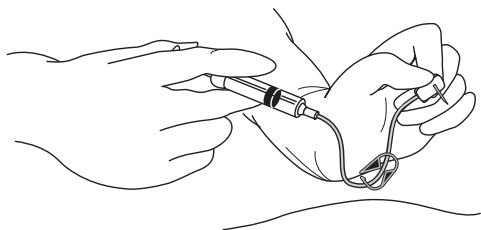


przepłukać zestaw solą fizjologiczną

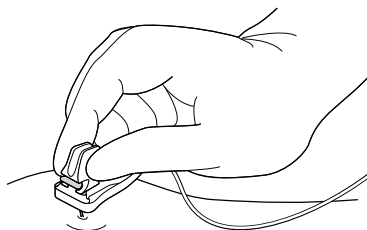


przytrzymać igłę i wkuć ją  
przez skórę i membranę portu  
pod kątem 90°

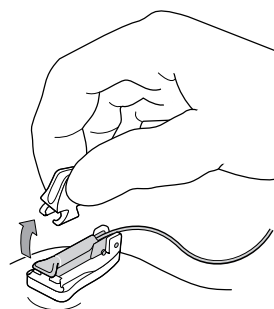


usunąć skrzydełka mocujące

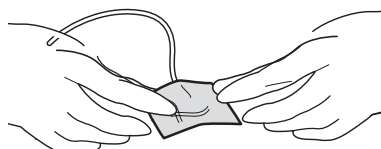

zabezpieczyć miejsce wkłucia  
opatrunkiem pokrywającym  
powierzchnię min. 4cm wokół igły

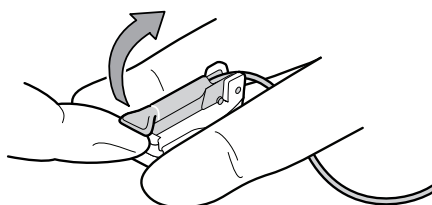

przytrzymać stabilnie podstawę  
igły między dwoma palcami  
a następnie podnieść dźwignię  
zabezpieczającą

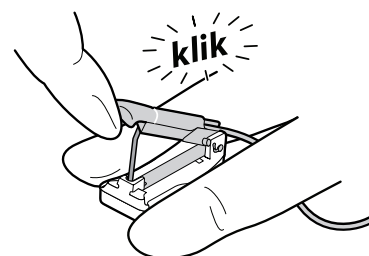

podnosić aż do kliknięcia  
sygnalizującego zablokowanie  
igły w korpusie

rozmiar	długość	bez portu Y	z portem Y (igłowym)	z portem Y (bezigłowym)
● 19	19 mm	21-2768-24	21-2868-24	21-2968-24
● 19	25 mm	21-2764-24	21-2869-24	21-2969-24
● 19	32 mm	21-2765-24	21-2870-24	21-2970-24
● 20	16 mm	21-2769-24	21-2864-24	21-2964-24
● 20	19 mm	21-2767-24	21-2865-24	21-2965-24
● 20	25 mm	21-2762-24	21-2866-24	21-2966-24
● 20	32 mm	21-2763-24	21-2867-24	21-2967-24
● 22	16 mm	21-2770-24	21-2860-24	21-2960-24
● 22	19 mm	21-2766-24	21-2861-24	21-2961-24
● 22	25 mm	21-2760-24	21-2862-24	21-2962-24
● 22	32 mm	21-2761-24	21-2863-24	21-2963-24

opakowanie zbiorcze 12 sztuk

**AKME**