

**MICRO MIST™**

### **MICRO MIST™ nebulizator małośobjętościowy**

łączy oszczędność ze skutecznością działania, może być stosowany przez pacjenta oddychającego samodzielnie lub jako element składowy obwodu oddechowego.

Dzięki pomysłowej kapilarnej budowie dostarcza gęstą mgiełkę drobnych cząsteczek aerozolu przy dowolnym kącie odchylenia od pionu aż do 90 stopni włącznie i dzięki temu pacjenci mogą pozostawać w pozycji leżącej lub wyprostowanej.

Optymalna średnica cząsteczek (MMAD 2,7 mikrona), wydajne tempo nebulizacji oraz minimalne pozostałości rozpylanego leku zapewniają efektywną depozycję leku.



Antyprzelewowa konstrukcja zbiorniczka o pojemności 6 ml oraz gwintowana uszczelniająca się pokrywka, zabezpieczają przed przeciekaniem oraz zapewniają łatwe podłączenie i odłączenie nebulizatora.

Prostota budowy i wyraźnie, skalowane co 1 ml oznakowanie pojemności umożliwiają szybkie przygotowanie leku i rozpoczęcie nebulizacji.

MICRO MIST™ jest dostępny oddzielnie lub z różnorodnymi zestawami wyposażenia dodatkowego zależnie od potrzeb użytkownika.

Skalowana co 1 ml pojemność nebulizatora zapewnia łatwą obserwację i kontrolę podczas nebulizacji.



### **W SKRÓCIE**

- zalecany przepływ 6-8 l/min
- MMAD (mediana średnicy cząstek): 2.7 mikronów
- tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika): 0.3 - 0.35 ml/min (3 - 3,5 ml/ 10min)
- pojemność zbiornika nebulizatora: 6 ml
- bez lateksu
- pakowane indywidualnie, po 50 sztuk

## INFORMACJA DLA ZAMAWIAJĄCYCH

### MICRO MIST™ nebulizator małoobjętościowy

Nr ref.	41880*	41883*	41890	41891	41892	41893	41894	41895	41898
Nebulizator	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Łącznik "T"		X		X	X			X	
Ustnik		X			X			X	
Przestrzeń matrywa 15 cm		X						X	
Dren tlenowy 210 cm		X		X	X	X	X	X	X
Standardowe złącze drenu		X		X	X	X	X		
Uniwersalne złącze drenu								X	X
Maska dla dorosłych** (Ref. 41083)						X			X
Maska pediatryczna** (Ref. 41885)							X		

\* Złącze pokrywki nebulizatora i łącznika "T" produktów: 41880 i 41883 mają rozmiar 18 mm. Pozostałe produkty mają rozmiar 22 mm.  
\*\* Maski aerozolowe

Dzięki pomysłowej kapilarnej budowie, nebulizator małoobjętościowy MICRO MIST™ może generować gęstą mgiełkę drobnych cząsteczek aerozolu przy dowolnym kącie odchylenia od pionu aż do 90 stopni włącznie.

Pozwala to personelowi medycznemu na stosowanie terapii aerozolowej nawet u pacjentów o specjalnych wymaganiach w trakcie leczenia np. takich, którzy pozostają w pozycji poziomej. Unikalnej konstrukcji podstawka dyfuzora nie wypadła w trakcie opróżniania zbiornika w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni.



### MICRO MIST™ nebulizator z łącznikiem Neb-Tee™ z zastawką do obwodu oddechowego

Nebulizator MICRO MIST™ z łącznikiem Neb-Tee™ z zastawką do obwodu oddechowego Nebulizator MICRO MIST™ z łącznikiem Neb-Tee™ wyposażonym w samodomykającą się zastawkę pozwala na prowadzenie nebulizacji bez rozłączania obwodu oddechowego i przerywania wentylacji. Jest przeznaczony do zainstalowania i pozostawienia na miejscu w obwodzie oddechowym. Port nebulizatora jest zawsze dostępny.

Zastawka otwiera i zamyka się automatycznie podczas podłączania i odłączania nebulizatora, co zabezpiecza przed rozszczelnieniem obwodu oddechowego (spadek ciśnienia oraz przenikanie mieszaniny oddechowej do otoczenia).

Zestaw zawiera łącznik Neb-Tee™ posiadający standardowe złącza 22 mm ID/OD oraz przestrzeń martwą długości 12 cm ze złączami 15F/22F umożliwiającą podłączenie łącznika Neb-Tee™ pomiędzy łącznikiem Y, a rurką intubacyjną.

Dodatkową gwarancję szczelności zapewnia zatyczka na uwięzi zabezpieczająca port nebulizatora.



### W SKRÓCIE

#### Nebulizator

- zalecany przepływ: 6-8 l/min
- MMAD (mediana średnicy cząstek): 2.7 mikronów
- tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika): 0.35 - 0.41 ml/min (3,5-4,1 ml/10 min)
- pojemność zbiornika nebulizatora: 6 ml

#### Łącznik Neb-Tee

- złącza: 22 mm O.D. x 18 mm I.D. x 22 mm I.D.

#### Przestrzeń martwa

- złącza: 15F/22F
- długość: 12 cm

#### Dren tlenowy

- długość: 210 cm

## INFORMACJA DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Nr ref.	Opis	Ilość
41745	MICRO MIST™ z łącznikiem Neb-Tee™ z zastawką	50

Dystrybutor w Polsce:




SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52  
tel.: +48 42 677 14 11, fax: +48 42 672 40 10  
www.skamex.com.pl info@skamex.com.pl



## NEBULIZATOR MICRO MIST® Z ŁĄCZNIKIEM NEB-TEE™ I ZASTAWKĄ

Nebulizator MICRO MIST z łącznikiem Neb-Tee jest wyposażony w zastawkę sprężynową, która otwiera się i zamyka automatycznie i pozwala na podawanie leku bez otwierania obwodu oddechowego lub przerywania wentylacji. Neb-Tee z łącznikami o śr. wew. 22 mm i śr. zew. – 22 mm.

- nie zawiera lateksu
- biologicznie czysty
- jednorazowego użytku

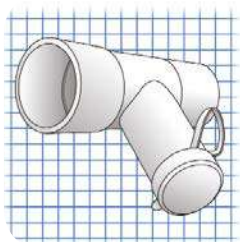

Łącznik Neb-Tee jest przeznaczony do ułatwienia dostępu do obwodu oddechowego 22 mm podczas podawania leków za pomocą nebulizatora niskoobjętościowego.



### NEBULIZATOR MICRO MIST Z ŁĄCZNIKIEM NEB-TEE I ZASTAWKĄ

**HUDSON RCI**

NR	NEBULIZATOR MICRO MIST	NEB-TEE	12 CM PRZESTRZEŃ MARTWA 22 F/15 F	DREN 210 CM	STANDARDOWY ŁĄCZNIK DRENU	ILOŚĆ
41745	x	x	x	x	x	50

#### MATERIAŁY

- maska aerozolowa: PCV
- obudowa: poliizopropen
- łącznik T: tworzywo K-resin
- zawór: poli-izopropen

#### UWAGA

nie stosować z lekami olejowymi

- zalecana minimalna objętość: 1 ml
- zalecana szybkość przepływu: 8 l/min.
- MMAD (mediana średnicy cząstek): 2,7 mikrona
- tempo nebulizacji: 0,34 ml/min
- pojemność zbiorniczka nebulizatora: 6 ml