

Vitasept® Wipes med

Alkoholowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

- Krótki czas działania – od 30 sekund
- Nie zawierają QAV, pochodnych fenolu, aldehydów
- Nie wymagają spłukiwania
- Nie pozostawiają śladów na dezynfekowanych powierzchniach
- Mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością
- Wymiar pojedynczej chusteczki 200mm x 200mm
- Gramatura 40g/m²

KLASYFIKACJA PRODUKTU

WYRÓB MEDYCZNY KL. IIA, CE 0537
PRODUKT BIOBÓJCZY – POZWOLENIE NR 8389/21

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Vitasept®Wipes med – chusteczki gotowe do użycia do szybkiej dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholu (m.in. wyrobów medycznych). Nie pozostawia śladów na powierzchniach, dzięki czemu nadaje się również do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i produktami spożywczymi. Spełnia wymagania obowiązujące w ochronie zdrowia, przemyśle spożywczym, usługach kosmetycznych itp.



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą.
Ulotka informacyjna przeznaczona dla użytkownika profesjonalnego.

Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Medi-Pro Sp. z o.o.

📍 ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa 📞 +48 22 811 03 22 🌐 www.medi-pro.com.pl
NIP: 524-040-80-22 KRS: 0000089304 BDO: 000402949 SRN: PL-IM-00026230



SPEKTRUM DZIAŁANIA

Metoda badania	Zakres skuteczności bójczej	Czas kontaktu
EN 16615	Bakteriobójczy (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae)	60 sek.
EN 16615	Drożdżakobójczy (C. albicans)	60 sek.
EN 13727	Bakteriobójczy (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae)	60 sek.
EN 13624	Grzybobójczy (C. albicans, A. brasiliensis)	60 sek.
EN 17387	Grzybobójczy (A. brasiliensis)	3 min.
EN 17387	Drożdżakobójczy (C. albicans)	60 sek.
EN 17387	Bakteriobójczy (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae)	3 min.
EN 13697	Bakteriobójczy (E. hirae)	60 sek.
EN 13697	Drożdżakobójczy (C. albicans)	60 sek.
EN 14348	Prątkobójczy (M. terrae)	30 sek.
EN 14348	Prątkobójczy (M. terrae, M. avium)	60 sek.
EN 14563	Prątkobójczy (M. terrae, M. avium)	60 sek.
EN 14476	Wirusobójczy (Herpes, SARS-CoV-2, Vaccinia, Polyoma SV 40, Adeno)	30 sek.
DVV/RKI	Wirusobójczy (BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, H5N1, H1N1)	30 sek.
EN 14476	Wirusobójczy (Polio, Noro, Rota)	60 sek.
EN 16777	Wirusobójczy (Noro, Adeno, Vaccinia)	60 sek.

SKŁAD

Etanol 15g, Propan-2-ol 60g.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Preparat do użytku profesjonalnego.
2. Produkt w formie chusteczek. Gotowe do użycia.
3. Otworzyć opakowanie i wyjąć chusteczkę, chusteczki odrywać pojedynczo.
4. Przetrzeć chusteczką całą dezynfekowaną powierzchnię.
5. Pozostawić do wyschnięcia w celu osiągnięcia efektu bójczego.
6. Po użyciu pojemnik z chusteczkami szczelnie zamknąć.
7. Powierzchnie kontaktujące się z żywnością po wykonanej procedurze dezynfekcyjnej należy dodatkowo zmyć wodą zdatną do picia.

OPAKOWANIA

Opakowanie	REF / Nr katalogowy	Pojemność	Opak. zbiorcze	EAN
Tuba	NOVA104W150-MED	150 szt.	10	4743239002648

PRODUCENT

Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe, SAKU VALD /
HARJUMAA / ESTONIA

DYSTRYBUTOR

Medi-Pro Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa
+48 22 811 03 22,
www.medi-pro.com.pl



Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby udzielić kompleksowych informacji na temat naszych produktów. Prosimy o skontaktowanie się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółów. Zadzwoń: 22 811 03 22 lub napisz: biuro@medi-pro.com.pl

Medi-Pro Sp. z o.o.

📍 ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa 📞 +48 22 811 03 22 🌐 www.medi-pro.com.pl
NIP: 524-040-80-22 KRS: 0000089304 BDO: 000402949 SRN: PL-IM-00026230

