

# Globacid® AF med

**Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz powierzchni niewinwazyjnych wyrobów medycznych na bazie alkoholu**

- Nie zawiera QAV, pochodnych fenolu, aldehydów
- Nie pozostawia śladów na dezynfekowanych powierzchniach
- Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością
- Krótki czas działania
- Może być stosowany na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych

## KLASYFIKACJA PRODUKTU

WYRÓB MEDYCZNY KL. IIA, CE 0537  
PRODUKT BIOBÓJCZY – POZWOLENIE NR 8353/21

## PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Preparat Globacid® AF med jest przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholu w tym powierzchni wyrobów medycznych oraz powierzchni mających kontakt z żywnością i produktami spożywczymi.



**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą.  
Ulotka informacyjna przeznaczona dla użytkownika profesjonalnego.**

**Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem środków ostrożności.  
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.**

Medi-Pro Sp. z o.o.

📍 ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa ☎ +48 22 811 03 22 🌐 [www.medi-pro.com.pl](http://www.medi-pro.com.pl)  
NIP: 524-040-80-22 KRS: 0000089304 BDO: 000402949 SRN: PL-IM-00026230



## SPEKTRUM DZIAŁANIA

Metoda badania	Zakres skuteczności bójczej	Czas kontaktu
EN 16615	Bakteriobójczy (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae)	60 sek.
EN 16615	Drożdżakobójczy (C. albicans)	60 sek.
EN 13727	Bakteriobójczy (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae)	60 sek.
EN 13624	Grzybobójczy (C. albicans, A. brasiliensis)	60 sek.
EN 17387	Grzybobójczy (A. brasiliensis)	3 min.
EN 17387	Drożdżakobójczy (C. albicans)	60 sek.
EN 17387	Bakteriobójczy (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae)	3 min.
EN 13697	Bakteriobójczy (E. hirae)	60 sek.
EN 13697	Drożdżakobójczy (C. albicans)	60 sek.
EN 14348	Prątkobójczy (M. terrae)	30 sek.
EN 14348	Prątkobójczy (M. terrae, M. avium)	60 sek.
EN 14563	Prątkobójczy (M. terrae, M. avium)	60 sek.
EN 14476	Wirusobójczy (Herpes, SARS-CoV-2, Vaccinia, Polyoma SV 40, Adeno)	30 sek.
DVV/RKI	Wirusobójczy (BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, H5N1, H1N1)	30 sek.
EN 14476	Wirusobójczy (Polio, Noro, Rota)	60 sek.
EN 16777	Wirusobójczy (Noro, Adeno, Vaccinia)	60 sek.

## SKŁAD

Etanol 15g, Propan-2-ol 60g.

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Preparat do użytku profesjonalnego.
2. Produkt w formie spray'u. Gotowy do użycia – nie rozcieńczać.
3. Nanieść preparat równomiernie na dezynfekowaną powierzchnię z odległości 30 cm za pomocą aplikatora lub za pomocą suchej chusteczki.
4. Pozostawić do wyschnięcia celem osiągnięcia efektu bójczego.
5. Powierzchnie kontaktujące się z żywnością po wykonanej procedurze dezynfekcyjnej należy dodatkowo zmyć wodą zdatną do picia.

## OPAKOWANIA

Opakowanie	REF / Nr katalogowy	Pojemność	Opak. zbiorcze	EAN
Butelka ze spryskiwaczem	NOVA104-1MED	1000 ml	12	4743239001528
Butelka flip-cap	NOVA104-1MED-FC	1000 ml	12	4743239024763
Kanister	NOVA104-5MED	5000 ml	3	4743239012395

## PRODUCENT

Goodpoint Chemicals OÜ  
Urda tee 2/1, Jälgimäe, SAKU VALD /  
HARJUMAA / ESTONIA

## DYSTRYBUTOR

Medi-Pro Sp. z o.o.  
ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa  
+48 22 811 03 22,  
www.medi-pro.com.pl



Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby udzielić kompleksowych informacji na temat naszych produktów. Prosimy o skontaktowanie się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółów. Zadzwoń: 22 811 03 22 lub napisz: biuro@medi-pro.com.pl

Medi-Pro Sp. z o.o.

ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa +48 22 811 03 22 www.medi-pro.com.pl  
NIP: 524-040-80-22 KRS: 0000089304 BDO: 000402949 SRN: PL-IM-00026230

