

Detro® San AF

Gotowy do użycia, bezalkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

- Bez zawartości alkoholu
- Skuteczność w warunkach brudnych
- Szeroka kompatybilność materiałowa
- Szybki czas działania – 1 minuta

KLASYFIKACJA PRODUKTU

WYRÓB MEDYCZNY KL. IIIA, CE 2195

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Szybka dezynfekcja oraz mycie powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, stetoskopów, kozetek, stolików, mebli medycznych, łóżek, sprzętu rehabilitacyjnego, stomatologicznego oraz unitów.

Detro®san AF jest kompatybilny ze wszystkimi powierzchniami wodoodpornymi, szkłem, plexą, powierzchniami drewnianymi, silikonem, materiałami ze stali nierdzewnej, ceramiką, a także z powierzchniami wrażliwymi na działanie związków utleniających. Może być stosowany do dezynfekcji zabawek.



**To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą.
Ulotka informacyjna przeznaczona dla użytkownika profesjonalnego.**

Medi-Pro Sp. z o.o.

📍 ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa ☎ +48 22 811 03 22 🌐 www.medi-pro.com.pl
NIP: 524-040-80-22 KRS: 0000089304 BDO: 000402949 SRN: PL-IM-00026230



ISO 9001

LL-C (Certification)



ISO 13485

LL-C (Certification)

SPEKTRUM DZIAŁANIA

Metoda badania	Zakres skuteczności bójczej	Czas kontaktu
EN 13727	Bakteriobójczy (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, E. coli)	1 min.
EN 16615	Bakteriobójczy (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae)	1 min.
EN 13624	Grzybobójczy (C. albicans, A. niger)	1 min.
EN 16615	Drożdżakobójczy (C. albicans)	1 min.
EN 14348	Pratkobójczy (M. avium, M. terrae)	1 min.
EN 14476	Wirusobójczy (Adeno, Polio, Noro)	1 min.
EN 13704	Sporbójczy (B. subtilis)	1 min.

SKŁAD

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano 1-3 diamina, Chlorek alkilodimetylobeznyloamonowy, Chlorek didecyldiemtyloamonowy.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Preparat do użytku profesjonalnego.
2. Produkt w formie piany. Gotowy do użycia -nie rozcieńczać.
3. Nanieść preparat na dezynfekowaną powierzchnię z odległości 30 cm za pomocą aplikatora lub za pomocą suchej chusteczki.
4. Preparat dokładnie rozprowadzić za pomocą ściereczki po całej dezynfekowanej powierzchni.
5. Pozostawić do wyschnięcia celem osiągnięcia pożądanego efektu bójczego.
6. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki, etykiety i karty charakterystyki.

OPAKOWANIA

Opakowanie	REF / Nr katalogowy	Pojemność	Opak. zbiorcze	EAN
Butelka ze sprysk.	S-M.DET.4.0015	750 ml	9	8680097102461
Butelka	S-M.DET.4.0008	1000 ml	9 + 2 sprysk.	8680097100757
Kanister	S-M.DET.4.0007	5000 ml	4	8680097101167

PRODUCENT

Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş.
Atatürk mah. Cemal Gürsel Cad. No:8,
34522 Kiraç, 34522 Esenyurt/İstanbul, Turcja

DYSTRYBUTOR

Medi-Pro Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa
+48 22 811 03 22,
www.medi-pro.com.pl



Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby udzielić kompleksowych informacji na temat naszych produktów. Prosimy o skontaktowanie się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółów. Zadzwoń: 22 811 03 22 lub napisz: biuro@medi-pro.com.pl

Medi-Pro Sp. z o.o.

📍 ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa 📞 +48 22 811 03 22 🌐 www.medi-pro.com.pl
NIP: 524-040-80-22 KRS: 0000089304 BDO: 000402949 SRN: PL-IM-00026230

