

Sani-Cloth® AF

Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

- Bez alkoholu, bez wybielaczy i bez PHMB, nie powodują podrażnień ani uczuleń skóry
- Nie wymagają aktywacji, nie pozostawiają smug na powierzchni
- Duża kompatybilność materiałowa
- Dostępne w opakowaniach typu flow pack, tubach i wiaderkach

KLASYFIKACJA PRODUKTU

WYRÓB MEDYCZNY KL. IIA, CE 2797

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Chusteczki Sani-Cloth® AF do szybkiej dezynfekcji oraz mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, stetoskopów, kozetek, stolików, mebli medycznych, łóżek, sprzętu rehabilitacyjnego, stomatologicznego oraz unitów. Chusteczki Sani-Cloth AF są kompatybilne ze wszystkimi powierzchniami wodoodpornymi, szkłem, plexą, powierzchniami drewnianymi, silikonem, materiałami ze stali nierdzewnej, ceramiką, a także z powierzchniami wrażliwymi na działanie związków utleniających.



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą.
Ulotka informacyjna przeznaczona dla użytkownika profesjonalnego.

Medi-Pro Sp. z o.o.

📍 ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa 📞 +48 22 811 03 22 🌐 www.medi-pro.com.pl
NIP: 524-040-80-22 KRS: 0000089304 BDO: 000402949 SRN: PL-IM-00026230



SPEKTRUM DZIAŁANIA

Metoda badania	Zakres skuteczności bójczej	Czas kontaktu
EN 16615	Bakteriobójczy (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae)	60 sek. (c), 2 min. (b)
EN 13727	Bakteriobójczy (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae)	30 sek. (c)
EN 16615	Drożdżakobójczy (C. albicans)	60 sek. (c), 2 min. (b)
EN 13624	Drożdżakobójczy (C. albicans, C. auris)	30 sek. (c)
EN 14476	Wirusobójczy (Vaccinia Virus, Noro, Corona, HIV, HBV, HCV, SARS, Flu)	30 sek. (c), 60 sek. (b)
EN 14476	Wirusobójczy (Rota)	30 sek. (c)
EN 14348	Prątkobójczy (M. terrae)	2 min. (c)

SKŁAD

„c-warunki czyste” / „b-warunki brudne”

Chlorek didecylodimetyloamonu, środki powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Preparat do użytku profesjonalnego.
2. Produkt w formie chusteczek. Gotowy do użycia – nie rozcieńczać.
3. Należy przetrzeć powierzchnię ruchem w kształcie litery S, rozpoczynając od obszaru czystego w kierunku zanieczyszczonego.
4. Tej samej powierzchni nie należy przecierać dwa razy tą samą chusteczką.
5. Pozostawić do wyschnięcia celem osiągnięcia pożądanego efektu bójczego.
6. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki, etykiety i karty charakterystyki preparatu.

OPAKOWANIA

Wielkość opak.	REF / Nr katalogowy	Rozmiar chusteczki	Opak. zbiorcze	EAN
Flow pack 100 szt.	EAF1100	280 mm x 200 mm	12	5056012300657
Tuba 200 szt.	EAF1120	200 mm x 200 mm	12	5056012300633
Wiaderko 225 szt.	EAF1110	270 mm x 267 mm	1	5056012300626

PRODUCENT

PDI (EMEA) Ltd
Pywell Road, Willowbrook Est. Industrial Estate,
Corby – Northants, NN17 5XJ, UK
+44 (0) 8081 697 945, www.wearepdi-intl.com

EC REP

Nex Medical
Antiseptics Srl
Via Arluno, 37/39, 20003
Casorezzo MI, Włochy

IMPORTER

Medi-Pro Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa
+48 22 811 03 22,
www.medi-pro.com.pl



Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby udzielić kompleksowych informacji na temat naszych produktów. Prosimy o skontaktowanie się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółów. Zadzwoń: 22 811 03 22 lub napisz: biuro@medi-pro.com.pl

Medi-Pro Sp. z o.o.

📍 ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa 📞 +48 22 811 03 22 🌐 www.medi-pro.com.pl
NIP: 524-040-80-22 KRS: 0000089304 BDO: 000402949 SRN: PL-IM-00026230

