



Trójenzymatyczny preparat (o neutralnym pH) do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów oraz manualnego mycia wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych oraz oprzyrządowania anestetycznego

gigazyme®
płyn

Zalety

- posiada doskonałe właściwości myjące dzięki zawartości enzymów i tenzydów
- wystarczająca skuteczność mycia w czasie 3 - 5 minut
- zapewnia ochronę przed korozją
- nie wytwarza piany
- możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych

Obszary zastosowania

Nie ma ograniczeń materiałowych odnośnie zastosowania preparatu. Preparat ten przeznaczony jest w szczególności do manualnego oraz półautomatycznego mycia endoskopów i manualnego mycia oprzyrządowania anestetycznego oraz instrumentów chirurgicznych. W czasie mycia należy zwracać uwagę na całkowite zanurzenie narzędzi tak, aby puste przestrzenie były wypełnione. Po zakończeniu mycia narzędzia należy dokładnie opłukać wodą. Nie zaleca się stosować do mycia w wodzie o temperaturze powyżej 35°C.

Właściwości produktu

gigazyme® jest specjalistycznym preparatem do mycia endoskopów, wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, na bazie kompleksu enzymów i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych.

Wskazówki dotyczące stosowania

Stężenie użytkowe:

Przy normalnym zanieczyszczeniu: 0,5-1%

Przy silnym zanieczyszczeniu: do 10%



Dane produktu

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) 648/2004:
(5-15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy,
kompozycje zapachowe)

Dane chemiczno-fizyczne

Forma	ciecz
Gęstość	ok. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
Kolor	niebieski
pH	5,5 - 8 / 100 % / 20 °C
Tarcie, dynamiczne	ok. 4 mPa*s / Metoda : ISO 3219
Temperatura zapłonu	44 °C / Metoda : DIN EN ISO 13736

Wskazówki szczególne

Nie używać preparatu po upływie terminu ważności.
Termin ważności: 3 lata

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
GIGAZYME płyn 2L FL	5/Karton	132105
gigazyme -INT- 2 l FL	5/Karton	70003409
gigazyme D/E 5 l KA	1/Kanister	70003408

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schülke & Mayr GMBH produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 0 22 11-60-700
Telefax +48 0 22 11-60-701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Wytwórca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com